

## Prise en charge de l'ulcère de jambe en ville

Le soin de l'ulcère de jambe, et notamment l'ulcère veineux, est complexe, du fait de :

### Sa superficie :

Généralement de grande taille, en forme de « carte de géographie » ou circonférentiel.

### Sa localisation :

Souvent localisé aux alentours de la cheville, mais peut s'étendre sur toute la partie de la jambe en dessous du genou.

### Son aspect :

Le lit de la plaie est régulièrement recouvert d'un enduit jaunâtre adhérent (fibrine) qui peut être surinfecté.

### Son exsudat :

Les ulcères veineux sont pour la plupart hyperexsudatifs et ces exsudats sont non seulement handicapants pour le patient (aspect négligé, pansement malodorant, froid, dégoulinant...), mais aussi délétères pour la peau périlésionnelle (macération, risque infectieux...).

Vliwasorb® pro est une solution.

La personne porteuse d'ulcère veineux présente dans la grande majorité des cas un œdème environnant, de même qu'une peau péri-ulcéreuse fragile avec des dermites de stase, des macérations...



## Traitement local des plaies ulcéreuses

**Détersion :** Laver à l'eau et au savon liquide (de préférence sous la douche) avec une compresse tissée ou **Debrisoft®**, rincer abondamment.

La détersion mécanique sera complétée par une détersion par la mise en place d'un pansement fibrinolytique (**Suprasorb® A**, pansement à l'alginate).

## Le choix du pansement

Celui-ci doit :

- Protéger la plaie des agressions extérieures.
- Entretenir un environnement favorable à la cicatrisation avec un milieu chaud et humide sans faire macérer la périlésion.
- Ne pas adhérer à la plaie.
- Absorber les exsudats sans dessécher.
- Empêcher l'entrée des microbes et des liquides extérieurs dans la plaie.
- Être protecteur et amortir les chocs.
- Changement de pansement atraumatique.
- Favoriser la cicatrisation.



**Vliwasorb® Pro** : Pansement hydrocellulaire superabsorbant de première intention pour ulcère de jambe sauf si besoin de fibrinolyse auquel cas associer ce dernier avec un alginat. **Vliwasorb® Pro** possède une bonne capacité d'absorption et de rétention et s'adapte au volume d'exsudat. **Vliwasorb® Pro**, favorise la cicatrisation physiologique, protège la peau périlésionnelle, et améliore le confort et la thérapie compressive du patient.